

GBT LOUNGE


DOKONALÝ ZÁŽITEK Z PROFYLAXE
MAXIMÁLNÍ ÚSPĚCH S GUIDED BIOFILM THERAPY



EMS 
MAKE ME SMILE.


PROFYLAXE

NA MAXIMUM

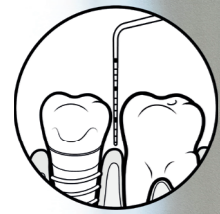

01. VYŠETŘENÍ A KONTROLA INFEKCE

- Začněte výplachem ústní vodou BacterX® Pro
- Vyšetřete stav chrupu, gingivy a tkáně parodontu
- Vyšetřete implantáty a tkáně v jeho okolí

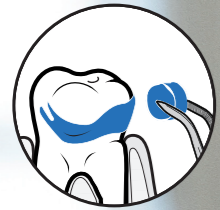

02. DETEKCE PLAKU

- Ukažte pacientovi obarvený biofilm a problematické oblasti díky EMS Biofilm Discloser
- Barva vás bude řídit při odstraňování biofilmu
- Po odstranění biofilmu je detekce zubního kamene jednodušší




03. MOTIVACE

- Zdůrazněte význam prevence
- Poučte pacienty o hygieně v oblasti ústní dutiny
- EMS doporučuje mezizubní kartáčky nebo zubní nit, elektrické nebo manuální zubní kartáčky a zubní pastu AIRFLOW® s erytroletem pro každodenní péči



04. AIRFLOW® MAX

- Použijte AIRFLOW® MAX k ošetření přirozených zubů, zubních náhrad a implantátů
- Odstraňte biofilm supra- a subgingiválně do 4 mm za použití prášku AIRFLOW® PLUS 14 µm
- Odstraňte biofilm také z dásní, jazyka a patra

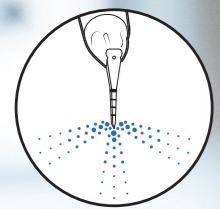


05. PERIOFLOW®

- Použijte prášek AIRFLOW® PLUS v hlubokých kapsách a kořenových furkacích přirozených zubů a na implantátech
- Používejte nové a tenčí jednorázové trysky PERIOFLOW®



06. PIEZON® PS

- Použijte mimořádně šetrnou ultrazvukovou koncovku EMS PIEZON® PS supra- a subgingiválně až do 10 mm
- Vyčistěte > 10 mm kapsy pomocí mini kyrety
- Použijte EMS PIEZON® PI MAX koncovku kolem implantátů subgingiválně až do 3 mm a na zubních náhradách

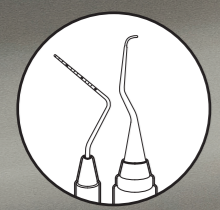

07. KONTROLA

- Udělejte finální kontrolu zbývajících biofilmu
- Ujistěte se, že je zubní kámen stoprocentně odstraněn
- Překontrolujte přítomnost zubních kazů
- Proveďte fluoridaci
- Už žádný polishing



08. RECALL

- Naplánujte recall dle typu pacienta
- Zeptejte se svého pacienta, zda se mu ošetření líbilo



GUIDED BIOFILM THERAPY -
NEJKOMFORTNĚJŠÍ,
NEJEFEKTIVNĚJŠÍ
A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
PROTOKOL PRO ZUBNÍ
ORDINACE.

Karen Davis, RDH, USA



AIRFLOW
PROPHYLAXIS MASTER

WELLNESS NA 9 M²



GBT Lounge je vhodný i do těch nejmenších ordinací. Obsahuje veškeré potřebné vybavení, které umožňuje nejlepší možné profylaktické ošetření a přizpůsobí se každé ordinaci. AIRFLOW® Prophylaxis Master, optimalizovaná ergonomie práce, komfortní křeslo s bočním vedením a jasné barvy nabízí "I FEEL GOOD" zážitek pacientům i ošetřujícím.

VAŠE DENTÁLNÍ SPA



CABINET DES HALLES, NEUCHÂTEL, ŠVÝCARSKO





CERTIFIED PRACTICE



RÁDA PACIENTŮM DOPŘEJI
WELLNESS ZÁŽITEK
PŘI ODBORNÉM
PROFYLAKTICKÉM
OŠETŘENÍ.

Marleen Goossen, dentální hygienistka



GBT



NASKENUJTE QR KÓD
A ZÍSKEJTE GBT CERTIFIKACI

SWISS DENTAL SPA, DE BILT, NIZOZEMSKO



NEJLEPŠÍ ROZHODNUTÍ

PRO MOJI ORDINACI



”

**DVA GBT LOUNGE NÁM
PŘINÁŠÍ NAVÍC 300 000 EUR
OBRATU ROČNĚ. I TO JE
JEDEN Z MNOHA DŮVODŮ,
PROČ SE GBT LOUNGE
PRO MOJI ORDINACI
VYPLATÍ.**

Dr. Kathrin Bajrami-Kober
2 GBT Lounge instalovány od roku 2020
Esslingen, Německo

ZAHNARZTPRAXIS BAJRAMI-KOBER, ESSLINGEN AM NECKAR, NĚMECKO



MÍSTNOST VĚNOVANÁ GBT

GBT Lounge je jedinečným řešením pro GBT ošetřování na nejvyšší úrovni. Plně integrovaný přístroj AIRFLOW® Prophylaxis Master nabízí bezbolestné profylaktické ošetření na nejvyšší úrovni a pracuje s nejmodernějšími technologiemi, jako jsou AIRFLOW® MAX, PERIOFLOW® a PIEZON® PS/PI MAX. GBT Lounge nabízí ucelené řešení pro nejlepší možné GBT ošetření v optimalizovaném pracovním prostředí včetně veškerého potřebného vybavení.

OPTIMÁLNÍ ERGONOMIE PRÁCE

GBT Lounge byl navržen pro lepší ergonomii práce ošetřujících. Boční vedení křesla nabízí mimořádný prostor pro nohy, čímž umožňuje udržet ergonomickou polohu po celou dobu ošetření a zároveň je možné ošetřit pacienta ze všech úhlů.

GBT židle přispívá k ergonomickému polohování a umožňuje ošetřujícímu pracovat ve zdravé pozici po celý den. Díky integrovanému přístroji AIRFLOW® Prophylaxis Master a bezdrátovému pedálu nepřekáží na podlaze žádné kabely. Bezdotykové dávkovače a světlo s mimořádným dosahem usnadňují práci a udržují nejvyšší možnou úroveň hygieny.



WOW EFEKT PRO VAŠE PACIENTY

Díky jasným barvám, příjemnému Ultra Relax polstrování křesla s paměťovou pěnou a komfortnímu GBT ošetření, přináší GBT Lounge pacientům jedinečný zážitek. Profylaktické ošetření v prostředí připomínajícím wellness vaši ordinaci odliší a pacienti se k vám rádi vrátí na recall.



ÚSPĚCH ORDINACE

"I FEEL GOOD" zážitek, který GBT Lounge nabízí, vede ke zvýšenému počtu recallů. Pacienti budou doporučovat vaši ordinaci rodině i přátelům, což vám přinese nové pacienty.

Poskytnutím výjimečného pracovního prostoru získáte snáze nové zaměstnance. GBT Lounge posune vaši ordinaci na vyšší úroveň a je zárukou obchodního úspěchu.



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER



- Nabídněte bezbolestné profylaktické ošetření pomocí nejnovějších technologií, jako jsou AIRFLOW® MAX, PERIOFLOW® a PIEZON® PS/PI MAX
- Kompletně integrován do křesla

BOČNÍ VEDENÍ KŘESLA



- Ultra Relax polstrování s paměťovou pěnou pro maximální komfort pacienta
- Maximalizovaný prostor pro nohy
- Ergonomie a flexibilita
- Vestavěný tácek s možností otáčení o 360°

ŽIDLE



- Ergonomicky správné držení těla
- Sedlový typ židle
- Nastavitelný úhel sezení

BEZDRÁTOVÝ PEDÁL



- Žádné kabely na podlaze
- Bezdrátové připojení k vašemu AIRFLOW® Prophylaxis Master

LED SVĚTLO



- Intenzita až 50 000 Lux
- Bezdotykový senzor pro lepší hygienu

NÁBYTEK A VYBAVENÍ*



- Mycí jednotka
- Bezdotykové dávkovače na mýdlo a dezinfekci
- Úložný prostor na spotřební materiál až na 14 dní

*Další vybavení GBT Lounge je dostupné dle aktuální nabídky v dané zemi.

KONTAKTUJTE NÁS A POSUŇTE SVOU ORDINACI NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Naskenujte QR kód, vyplňte kontaktní údaje a GBT expert pro danou lokalitu se s vámi spojí pro naplánování GBT Lounge ve vaší ordinaci.



“I FEEL GOOD”

GUIDED BIOFILM THERAPY

01 NEW RECALL
ASK YOUR PATIENT ABOUT THEIR DENTAL HISTORY

02 EVALUATE
EVALUATE ORAL HEALTH AND PERIODONTAL STATUS

03 DISCLOSE
REVEAL BIODIFFERENTIATION

04 PREZON™ PIS
REMOVE BIODEPOSIT AND BIODEPOSIT

05 PERIFLOW™
REMOVE BIODEPOSIT AND BIODEPOSIT

06 AIRFLOW™
REMOVE BIODEPOSIT AND BIODEPOSIT

07 QUALITY CONTROL
CHECK TREATMENT

08 POSTTREAT
EVALUATE AND REFLECT

GUIDED BIOFILM THERAPY

EMS
MAKE ME SMILE.



E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon
info.czsk@ems-ch.com

EMS 
MAKE ME SMILE.