


# VistaScan


## Práce s paměťovou fólií



Vložte senzor do ochranného obalu

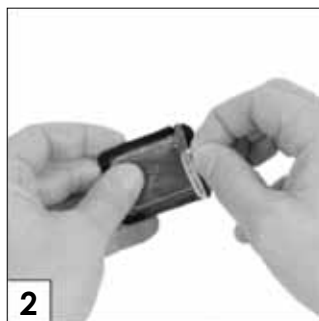


Pečlivě jej uzavřete

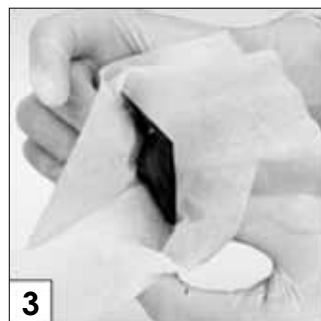


Po expozici očistěte obal dezinfekčním ubrouskem



Otevřete obal v naznačeném místě

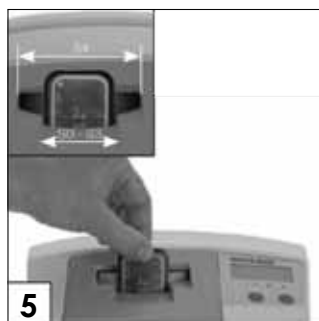

Vložte senzor i s obalem do přístroje

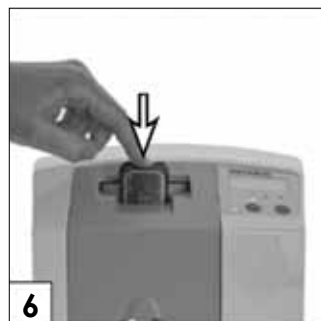

Lehkým tlakem posuňte senzor do přístroje



Po oskenování odeberte senzor a pečlivě jej uložte



Nakonec vyjměte obal a vyhoďte jej

### Tip na rychlou dezinfekci:



FD 350 wipes  
Dezinfekční ubrousky  
269 Kč (110 ks v dóze)  
207 Kč (110 ks - náhradní balení)